



Spezialversorgungen

Individuelle Kompressionsprodukte
in der Lymphologie – für optimale
Behandlungserfolge mit mehr Komfort




Kundenservice

Juzo – Immer für Sie da

Sympathisch, freundlich und kompetent – so werden wir von unseren Kunden beschrieben. Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem offenen Ohr kümmern wir uns um Ihr Anliegen. Unser Anspruch ist es, Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden und daher suchen wir fortlaufend nach geeigneten Lösungen. Dabei greifen wir auf unsere Erfahrung und unser einzigartiges Fachwissen, das wir stetig weiterentwickeln, zurück. Wir stehen Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, um nicht nur unseren Qualitätsansprüchen zu genügen, sondern Sie dabei zu unterstützen, den Therapieerfolg Ihrer Patienten durch passende Produkte zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und werden eine Lösung finden, denn geht nicht, gibt es bei uns nicht!

Der Juzo Kundenservice bietet Ihnen:

- + Allgemeine Informationen
- + Auskunft über den Auftragsstatus
- + Auftragsannahme
- + Individuelle Produktberatung
- + Annahme von Änderungs- und Reparaturaufträgen
- + Beratung bei Spezialfragen rund um die Kompressionstherapie

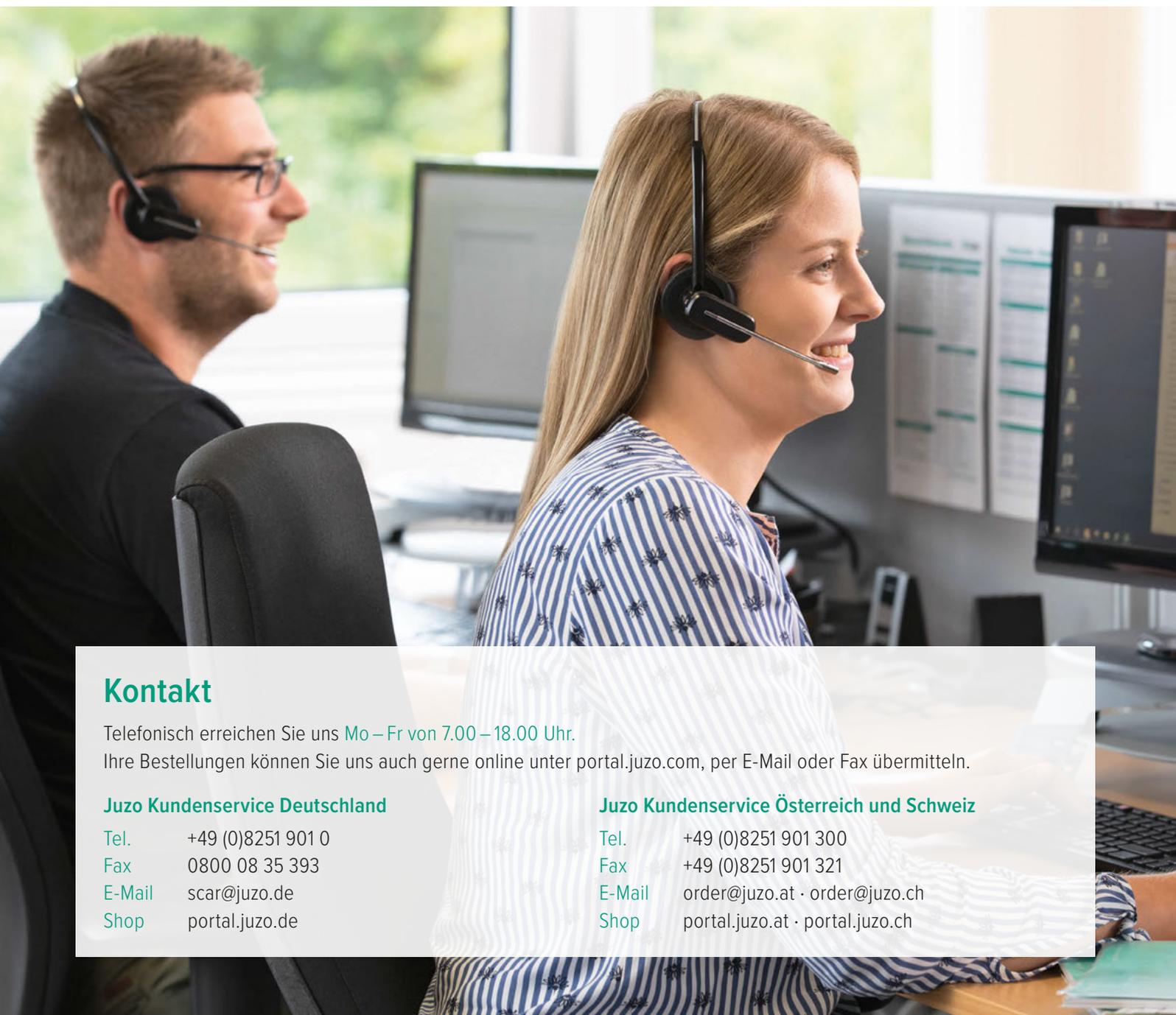

Kontakt

Telefonisch erreichen Sie uns **Mo – Fr von 7.00 – 18.00 Uhr**.

Ihre Bestellungen können Sie uns auch gerne online unter portal.juzo.com, per E-Mail oder Fax übermitteln.

Juzo Kundenservice Deutschland

Tel. +49 (0)8251 901 0
 Fax 0800 08 35 393
 E-Mail scar@juzo.de
 Shop portal.juzo.de

Juzo Kundenservice Österreich und Schweiz

Tel. +49 (0)8251 901 300
 Fax +49 (0)8251 901 321
 E-Mail order@juzo.at · order@juzo.ch
 Shop portal.juzo.at · portal.juzo.ch

So finden Sie schnell zum passenden Produkt

Allgemeine Informationen

Die effektive Ödemtherapie	04
Kompressionssysteme für die Entstauung	05
Lymphologie Experte	06
Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten	46
Praxistipps für den Versorger	47
Fallbeispiel	47

Produktübersicht

Zehenteile	09
Wadenstrümpfe	11
Schenkelstrümpfe	15
Strumpfhosen	19
Handschuhe	27
Ärmel	31
Thoraxversorgungen	35
Kopfversorgungen	39
Stumpfversorgungen (Arm und Bein)	43

Kompressionssysteme für die Entstauung

Juzo SoftCompress und Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

Kompressionsbandagierung

Mit **Juzo SoftCompress** kann der Erfolg der Entstauungstherapie deutlich gesteigert werden. Die Bandagehilfen und Zusatzprodukte zeichnen sich, im Gegensatz zu häufig verwendeten Synthetikmaterialien, durch eine besonders hautfreundliche Baumwolloberfläche aus. Diese ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Die vertikal verlaufenden Schaumstoffkanäle bilden eine einzigartige Oberflächenstruktur, die den Abfluss der Lympflüssigkeit unterstützt. Zudem ermöglichen die Juzo SoftCompress Bandagehilfen dem Patienten eine einfache Eigenanwendung und sichern somit den Therapieerfolg langfristig.



Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) können in der Entstauungstherapie als effiziente Alternative zu herkömmlichen Kompressionsbinden eingesetzt werden. Die innovativen Produkte ermöglichen es dem medizinischen Fachpersonal, zeit- und kostensparend den Therapieerfolg zu begünstigen. Sie lassen sich individuell an den Patienten anpassen – auch bei sich verändernden Umfängen während der Therapie. Durch die einfache Handhabung können Patienten die Klettverschlüsse während des Tragens selbst nachjustieren, sodass die Kompressionswirkung auch bei fortschreitender Entstauung optimal aufrechterhalten werden kann. Bestehen offene Wunden im Versorgungsbereich, muss der Wundbereich zunächst mit einem Wundverband abgedeckt werden, bevor das Kompressionssystem angelegt wird. Zum Schutz und zur Fixierung von Wundaufgaben empfehlen wir das Tragen eines Unterziehstrumpfs (z.B. Juzo Liner).

Juzo ACS Light



Juzo Compression Wrap



Juzo SoftCompress und Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) können auch in Kombination miteinander getragen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Juzo Therapiekonzept Kompressionssysteme für die Entstauung.



Lymphologie Experte

Vielseitige Kompressionsprodukte von Kopf bis Fuß

Anwendung in der Lymphologie

In der Lymphologie werden hauptsächlich flachgestrickte Produkte mit Naht eingesetzt. Sie sind neben der Lymphdrainage die Basis jeder Ödemtherapie. Kompressionsbekleidung sichert den Erfolg der Entstauungstherapie dauerhaft und ist in der Lymphologie meist unverzichtbar. Vom Fuß-Zehenteil über Strümpfe und Strumpfhosen bis hin zur Gesichtsmaske können alle Körperbereiche versorgt werden. Die flachgestrickten Produkte werden exakt nach den Körpermaßen des Patienten gestrickt und sind je nach Anwendungsgebiet in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Durch die Kombination verschiedener Materialien, z. B. mit Baumwolle oder Silber, bietet Juzo Versorgungen für unterschiedlichste Patientenbedürfnisse an.

Wirkungsweise

Die starken Gestricke zeichnen sich durch Besonderheiten wie einen lymphabflussfördernden Massageeffekt aus. Außerdem geben die Gestricke dem Ödem nicht nach. In Verbindung mit Bewegung entsteht ein hoher Arbeitsdruck, der die optimale Komprimierung des ödematisierten Gewebes ermöglicht – ideal in der Lymphologie.


Überzeugende Produktvorteile

- + Optimaler Tragekomfort für die Patienten durch die besonders flachen und elastischen Nähte
- + Die Beweglichkeit des Patienten bleibt durch das homogene, weiche und anschmiegsame Material erhalten
- + Hohe Hautverträglichkeit durch die doppellagige Umwindung der Kompressionsfäden mit textilen Garnen
- + Alltagstauglichkeit der Kompressionsbekleidung durch die Verwendung latexfreier, sonnen- und salbensicherer, strapazierfähiger und dennoch luftdurchlässiger Materialien
- + Leichtes An- und Ausziehen durch feinmaschige Oberflächenstruktur des Gestricks und optionale Einarbeitung zusätzlicher Verschlüsse (Haken-, Reiß- und Klettverschlüsse)
- + Vielzahl von lymphologischen Sonderausstattungen für die individuelle Patientenversorgung

Juzo Expert

Individuell für die Ödemversorgung

Juzo Expert bietet maximale Bewegungsfreiheit und ist besonders angenehm zu tragen. Das Gestrick eignet sich auch perfekt für Flachstrick-Einsteiger und Ganzkörper-versorgungungen.

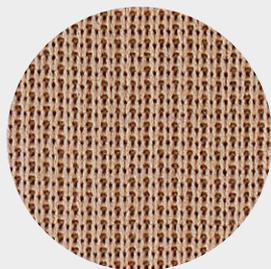


Juzo Expert

Juzo Expert Strong

Stark für ausgeprägte Ödeme

Juzo Expert Strong zeichnet sich durch einen hohen Arbeitsdruck und aktivierenden Massageeffekt aus, der den Lymphabfluss anregt. Das feste und starke Gestrick unterstützt effektiv die Behandlung ausgeprägter Lymph- und Lipödeme.

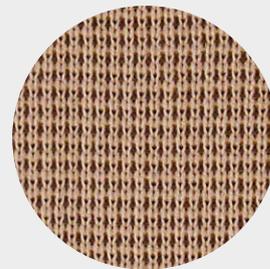

Juzo Expert Strong

Kompressionsgestricke mit Silberfaden

Der auf die Hautflora abgestimmte Silberanteil stellt das Gleichgewicht entzündeter und irritierter Haut wieder her und schützt vor weiteren Infektionen. Der antibakterielle Effekt entsteht durch freigesetzte Silberionen, die ein breites Wirkspektrum gegen Bakterien wie Staphylococcus aureus aufweisen. Durch das Tragen der silberhaltigen Kompressionsgestricke werden sowohl die Bakterien auf der Haut als auch der Juckreiz vermindert – Hautinfektionen kann vorgebeugt werden. Durch die bakterizide Wirkung wird gleichzeitig die Bildung von Körpergeruch erzeugenden Stoffen reduziert. Das Silbergestrick unterstützt zudem einen besonderen Tragekomfort durch kühlende, bzw. wärmende Materialeigenschaften.

Weitere Informationen zu den Juzo Kompressionsgestricken mit Silberfaden unter www.juzo.de/silver

Kompressionsgestricke mit Baumwolle

Juzo Expert Cotton und Juzo Expert Strong Cotton sind mit ihrem hohen Baumwollanteil besonders weich und geschmeidig. Die Versorgungungen sind besonders für empfindliche Haut geeignet, da die Haut nur mit der reinen Naturfaser in Berührung kommt. Die Gestricke überzeugen durch hohen Tragekomfort und ein angenehmes Hautklima. Aufgrund des weichen Materials wird auch das An- und Ausziehen der Versorgung erleichtert. Die hochwertigen Baumwollfäden verleihen den Versorgungungen einen besonderen Schimmer, der von modebewussten Trägerinnen geschätzt wird.

Weitere Informationen unter www.juzo.de/cotton

Farben

Erhältlich für Juzo Expert und Juzo Expert Strong (KKL 1 – 3)*

 Zucker	 Kakao	 Trend Colours
 Sesam	 Mohn	 Fashion Colours
 Mandel	 Blaubeere	*Silver, Cotton und KKL 4 nur in Farbe Mandel erhältlich.
 Zimt	 Pfeffer	

Erhältlich für Juzo Expert



Batik Collection

Alle Standardfarben (außer Zucker und Mandel) und Trend Colours wahlweise in schwarz oder weiß gebatikt erhältlich.



Dip Dye Collection

Farben Mohn und Blaubeere in KKL 1–2 in den Ausführungen AD, AF, AG sowie Ärmel nach Maß verfügbar.



Lebensfreude in Bewegung



Zehenteile

Komprimierende Zehenteile

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver



Komprimierendes Zehenteil



Ausführungsvarianten

Zehenteil

Angenähtes Zehenteil



Zehen

Offene Zehen

Geschlossene Zehen

Kl. Zehe (5) ganz offen · Öffnung schräg

Kl. Zehe (5) ganz offen · Öffnung gerade

· Standard



Sonderausstattung

Nähte nach außen gelegt

- Besonders flache Naht auf der Haut
- Geeignet für empfindliche Haut
- Auch mit offenen Zehen möglich



Wadenstrümpfe

Wadenstrümpfe

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver
- Juzo Expert Strong Cotton



Fußspitze



Distaler schräger Fußabschluss bei offener Fußspitze

- Bei Fußrückenödem

Distaler schräger Fußabschluss bei geschlossener Fußspitze

- Bei Fußrückenödem

Offene Fußspitze

Geschlossene Fußspitze

- Besonders elastisch
- Hoher Tragekomfort



Angenähstes Zehenteil

- Keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil
- Kleine Zehe (5) offen möglich

Abschluss / Befestigung


**Seitliche Überhöhung/
Seitliche Überhöhung max.**

- Lateraler, schräger Abschluss
- Optimierter Druckauslauf nach proximal


Gestrickabschluss

- Bei Bedarf zusätzliche Befestigung möglich (z.B. Adhäsionslotion)


**Noppenhafrand · 5 cm
Noppenhafrand Motiv · 5 cm**

- Noppenhafrand auch Breite 3,5 cm
- Hohe Stabilität und Atmungsaktivität durch Silikonknoppen


**Balancehafrand · 5 cm
Balancehafrand Motiv · 5 cm**

- Balancehafrand auch Breite 3,5 cm
- Besonders hohe Luftdurchlässigkeit
- Minimale Scherkräfte


Spitzenhafrand · 5 cm

- Besonders gute Haftung durch zirkuläre Silikonstreifen


Elastisches Band · 3,5 cm

- Stabiles Band
- Silikonfrei

Sonderausstattungen

**90° Fuß**

- Verminderte Faltenbildung im Spann-/Ristbereich durch anatomisch gestrickte Ferse

**Haftbandstücke**

- Bi-elastisches Material
- Mögliche Platzierung: seitlich außen quer

**Futterstoff bei „cY“**

- Bei empfindlicher Haut im Spann-/Ristbereich
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich

**Eingearb. Druckpelotten nach Dr. Rotter**

- Verbesserung des Kompressionsdruckes in den Bisgaard'sche Kulissen
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich
- Alternativ auch Malleolen-Pelotten aus Silikon möglich

**Innen eingenähter Haftrand**

- Nur mit Überhöhung möglich
- Auch 3/4 innen eingenäht möglich
- Mit oben angesetztem Haftrand kombinierbar

**Eingearbeitete Tasche für Pelotte**

- Individuell nach Anzeichnung
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich

**Nähte nach außen gelegt**

- Besonders flache Naht auf der Haut
- Geeignet für empfindliche Haut

**Reißverschluss**

- Standard in der Naht, individuelle Platzierung möglich

**Silikonbeschichtung an der Fußsohle**

- Anti-Rutsch-Beschichtung

**Spitzennaht nach außen gelegt**

- Geeignet für empfindliche Zehen
- Bei geschlossener Fußspitze möglich



Oberschenkelstrümpfe

Oberschenkelstrümpfe

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver
- Juzo Expert Strong Cotton



Distaler schräger Fußabschluss bei offener Fußspitze

- Bei Fußrückenödem

Distaler schräger Fußabschluss bei geschlossener Fußspitze

- Bei Fußrückenödem

Offene Fußspitze

- Besonders elastisch
- Hoher Tragekomfort

Geschlossene Fußspitze

- Besonders elastisch
- Hoher Tragekomfort



Angenähtes Zehenteil

- Keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil
- Kleine Zehe (5) offen möglich

Abschluss / Befestigung



- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Seitliche Überhöhung/
Seitliche Überhöhung max.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lateraler, schräger Abschluss - Optimierter Druckauslauf nach proximal | <p>Vordere Oberbeinerhöhung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung für besseren Halt bei ventro-lateralem Oberschenkelödem | <p>Gestrickabschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Bedarf zusätzliche Befestigung möglich (z.B. Adhäsionslotion) | <p>Noppenhafrand - 5 cm
Noppenhafrand Motiv - 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Stabilität und Atmungsaktivität durch Silikonknoppen |
|---|---|---|---|



- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Balancehafrand - 5 cm
Balancehafrand Motiv - 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besonders hohe Luftdurchlässigkeit - Minimale Scherkräfte | <p>Spitzenhafrand - 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besonders gute Haftung durch zirkuläre Silikonstreifen | <p>Hüftbefestigung - einzeln</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzlicher Hafrand zur besseren Fixierung möglich - Links oder rechts zu tragen | <p>Hüftbefestigung - Paar</p> <ul style="list-style-type: none"> - An Vorder- und Rückseite zu öffnen - Auf Wunsch an einem Gurt (vorne zu öffnen) - Auch mit zusätzlichem Hafrand möglich |
|--|--|--|--|



- Angenähtes Leibteil**
- Alternative Befestigungsmöglichkeit mit Kompression im Bauchbereich

Sonderausstattungen

			
90° Fuß	Anatomisch abgewinkeltes Knie	Haftbandstücke	
<ul style="list-style-type: none"> · Verminderte Faltenbildung im Spann-/Ristbereich durch anatomisch gestrickte Ferse 	<ul style="list-style-type: none"> · 30°- oder 50°- Abwinkelung möglich · Bei überwiegend abgewinkelter Knieposition 	<ul style="list-style-type: none"> · Bi-elastisches Material · Mögliche Platzierung am Oberschenkel: seitlich außen quer, vorne längs 	
			
Innen eingenähter Haftrand	Futterstoff bei „cY“	Futterstoff bei „cE“	Eingearb. Druckpelotten nach Dr. Rotter
<ul style="list-style-type: none"> · Nur mit Überhöhung möglich · Auch 3/4 innen eingnäht möglich · Mit oben angesetztem Haftrand kombinierbar 	<ul style="list-style-type: none"> · Bei empfindlicher Haut oder Hautfalten im Spann-/Ristbereich · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · Bei empfindlicher Haut im Kniekehlenbereich · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · Verbesserung des Kompressionsdruckes in den Bisgaard'sche Kulissen · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich · Auch Malleolen-Pelotten (Silikon) möglich
			
Eingearbeitete Tasche für Pelotte	Nähte nach außen gelegt	Porosa ab „cD“	Reißverschluss
<ul style="list-style-type: none"> · Individuell nach Anzeichnung · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · Besonders flache Naht auf der Haut · Geeignet für empfindliche Haut 	<ul style="list-style-type: none"> · Kompressionsreduzierung ab „cD“ 	<ul style="list-style-type: none"> · Standard in der Naht, individuelle Platzierung möglich
			
Seitl. Doppelspiralen und/oder Patellaring	Silikonbeschichtung an der Fußsohle	Spitzennaht nach außen gelegt	
<ul style="list-style-type: none"> · Integrierte Kniebandage 	<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Rutsch-Beschichtung 	<ul style="list-style-type: none"> · Geeignet für empfindliche Zehen · Bei geschlossener Fußspitze möglich 	



Strumpfhosen

Strumpfhosen

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver
- Juzo Expert Strong Cotton



· Bei Fußrückenödem

· Bei Fußrückenödem


- Besonders elastisch
- Hoher Tragekomfort



Angenähstes komprimierendes Zehenteil


- Keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil
- Kleine Zehe (5) offen möglich

Leibteilvarianten

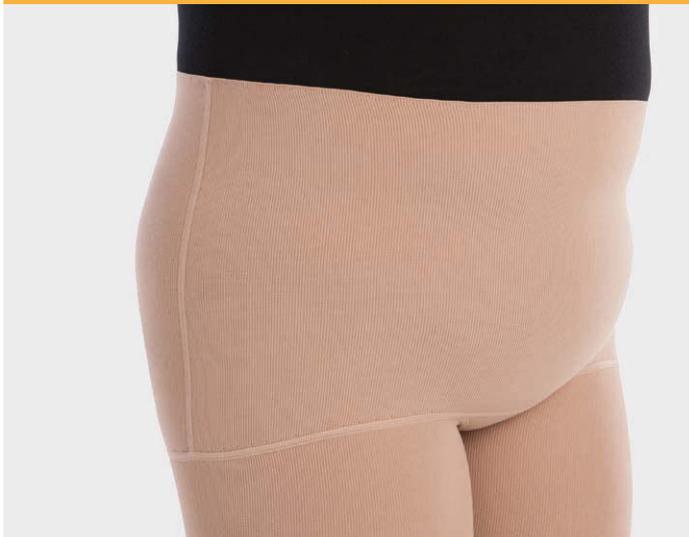

Schrägversion

- Standard
- Bei frontaler Ödemausprägung
- Bei flachem Leistenverlauf
- Stufenloser Nahtverlauf

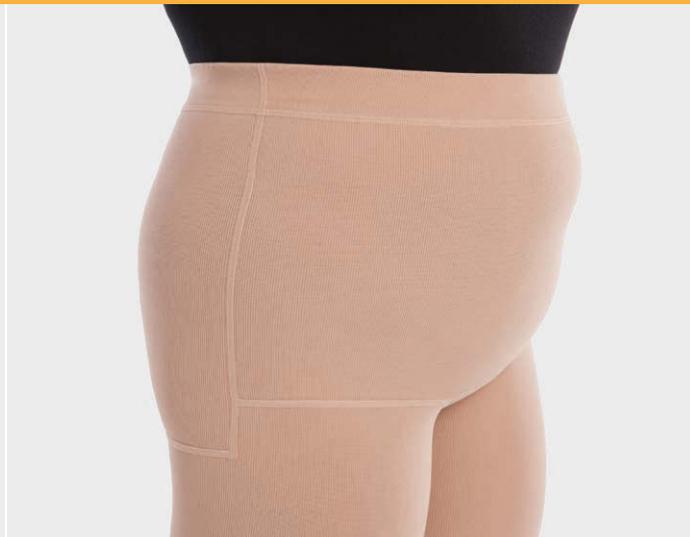

Kastenform

- Empfehlenswert bei großen Umfangsmaßen
- Bei lateraler Ödemausprägung
- Bei stark ausgeprägten Hüft- und Gesäßformen
- Besonderer Tragekomfort bei sitzender Tätigkeit



Slipform

- Bei steilem Leistenverlauf
- Bei flacher Bauchpartie
- Leibumfang bis 120 cm
- Bevorzugt für Lipödem Stadium 1 und 2



Schwangerschaftsbefestigung

- Leibteil im Rückenbereich KKL 1
- Mitwachsendes Netzgestrick ohne Kompressionsdruck im Bauchbereich
- Weitenverstellbarer Taillengurt mit hautfreundlichem Microklettverschluss – links oder rechts wählbar
- Nahtverlauf wie Schrägversion
- Mindestleibteillänge 34 cm

Standardkombinationen (Jede andere Kombination möglich)
AT-Leibteile allgemein

AT	KKL			
	1	2	3	4
Beinteile	1	2	3	4
Leibteil	1	2	2	2

Abschluss / Befestigung



Gestrickabschluss

- Weicher Abschluss

Bund und Taillengummi

- Individuelle Verstellmöglichkeiten durch Einziehband mit Knöpfen

Taillengurt

- Flacher und elastischer Abschluss
- Kein Umrollen der Gestrickkante

Taillengurt mit Klettverschluss

- Flacher und elastischer Abschluss mit Verstellmöglichkeit



Noppenhafttrand · 5 cm

- Flacher Abschluss
- Zusätzliche Befestigung mit Silikon-noppen

Leibteil mit Reißverschluss

- Standard mittig
- Individuelle Platzierung möglich

Leibteil mit Hakenverschluss

- Standard mittig
- Individuelle Platzierung möglich

Leibteil mit Klettverschluss

- Standard mittig
- Individuelle Platzierung möglich

Sonderausstattungen



Zwickel

- In Form gestrickt
- Auch komprimierender Zwickel möglich

Zwickel klein

- Vorteilhaft bei großen Oberschenkel-umfängen
- Auch komprimierender Zwickel möglich

Netzzwickel

- Bessere Luftzirkulation

Netzzwickel klein

- Vorteilhaft bei großen Oberschenkel-umfängen
- Bessere Luftzirkulation



Eingriff

- Für Männer
- Eingriff quer

Skrotum (Hodensack)

- Optimale Passform im Genitalbereich bei Männern
- Auch in Kombination mit Schlitz möglich
- Auch mit Netzmaterial möglich

Stomaöffnung

- Individuell nach Anzeichnung

Schritt offen

- Ohne Zwickel
- Nicht zu empfehlen bei adipösem Gewebe

Sonderausstattungen

**90° Fuß**

- Verminderte Faltenbildung im Spann-/Ristbereich durch anatomisch gestrickte Ferse

**Anatomisch abgewinkelte Form bei „cE“**

- 30°- oder 50°- Abwinkelung möglich
- Bei überwiegend abgewinkelter Knieposition

**Haftbandstücke**

- Bi-elastisches Material
- Mögliche Platzierung am Oberschenkel: seitlich außen quer, vorne längs
- Mögliche Platzierung im Leibteil: seitlich längs, hinten und vorne quer

**Innen eingenähter 3/4 Hafttrand**

- Am Oberschenkel
- Mehr Stabilität und Haftung
- Möglich bei Leibteil in Schrägversion und Slipform

**Futterstoff bei „cY“**

- Bei empfindlicher Haut oder Hautfalten im Spann-/Ristbereich
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich

**Futterstoff bei „cE“**

- Bei empfindlicher Haut im Kniekehlenbereich
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich

**Eingearb. Druckpelotten nach Dr. Rotter**

- Verbesserung des Kompressionsdruckes in den Bisgaard'schen Kulissen
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich
- Alternativ auch Malleolen-Pelotten aus Silikon möglich

**Eingearbeitete Tasche für Pelotte**

- Individuell nach Anzeichnung
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich

**Nähte nach außen gelegt**

- Besonders flache Naht auf der Haut
- Geeignet für empfindliche Haut

**Reißverschluss**

- Standard in der Naht, individuelle Platzierung möglich

**Seitl. Doppelspiralen und/oder Patellaring**

- Integrierte Kniebandage

**Silikonbeschichtung an der Fußsohle**

- Anti-Rutsch-Beschichtung

**Spitzennaht nach außen gelegt**

- Geeignet für empfindliche Zehen
- Bei geschlossener Fußspitze möglich

Zusatzprodukte · AD, AG und AT

Pelotten		Lymphpads	
			
Druckpelotten nach Dr. Rotter	Malleolen-Pelotte	Lymphpad Line	Lymphpad Square
<ul style="list-style-type: none"> · Zur Druckverbesserung im Knöchelbereich · Aus Carbonsanformschaum · Mit textilelastischem oder silberhaltigem Material bezogen 	<ul style="list-style-type: none"> · Zur Druckverbesserung im Knöchelbereich · Aus Silikon, weich und flach · Ohne Bezug oder bezogen mit textilelastischem oder silberhaltigem Material 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm


SoftCompress			
			
Pelotte Fußknöchel	Einlage Kniekehle	Genitaleinlage Frauen	Genitaleinlage Männer
<ul style="list-style-type: none"> · Zur Druckverbesserung im Knöchelbereich · Mit hautfreundlichem Baumwollbezug 	<ul style="list-style-type: none"> · Optimierung der Druckverhältnisse in der Kniekehle 	<ul style="list-style-type: none"> · Zum Einlegen in eine Kompressionsstrumpfhose · Gezielte Druckoptimierung bei Genital-Ödemen sowie ideale Druckverteilung 	<ul style="list-style-type: none"> · Zum Einlegen in eine Kompressionsstrumpfhose · Gezielte Druckübertragung und Polsterung des Genitalbereichs bei Männern

Befestigung	Pflegeprodukte		
			
Adhäsionslotion	Lymph Lotion	Vital Balsam 7	Spezialwaschmittel
<ul style="list-style-type: none"> · Spezial-Roll-on für einen sicheren Halt von Strümpfen und Ärmeln 	<ul style="list-style-type: none"> · Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödemem 	<ul style="list-style-type: none"> · Kühlender und pflegender Balsam für geschmeidige Haut während der Kompressionstherapie 	<ul style="list-style-type: none"> · Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung

An- und Ausziehhilfen			
			
EasyFit XL	Slippie Bein	Arion Easy-Slide Bein	Arion Sim-Slide®
<ul style="list-style-type: none"> · An- und Ausziehhilfe · Für offene/geschlossene Fußspitze 	<ul style="list-style-type: none"> · Anziehhilfe aus gleitfähigem Tyvek · Bei offener Fußspitze 	<ul style="list-style-type: none"> · Anziehhilfe bei offener Fußspitze 	<ul style="list-style-type: none"> · An- und Ausziehhilfe bei offener Fußspitze
Anziehhilfen		Accessoires	Unterziehstrumpf
			
Arion Magnide® 2in1	Arion Easy-Off®	Spezialhandschuhe	Juzo Liner Silver
<ul style="list-style-type: none"> · An- und Ausziehhilfe bei geschlossener Fußspitze 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausziehhilfe bei offener Fußspitze 	<ul style="list-style-type: none"> · Griffige Beschichtung · Erleichtert das Anziehen der Kompressionsbekleidung 	<ul style="list-style-type: none"> · Mit antibakteriellem Silberfaden · Fixierung von Wundauflagen und Pelotten



Lebensfreude in Bewegung

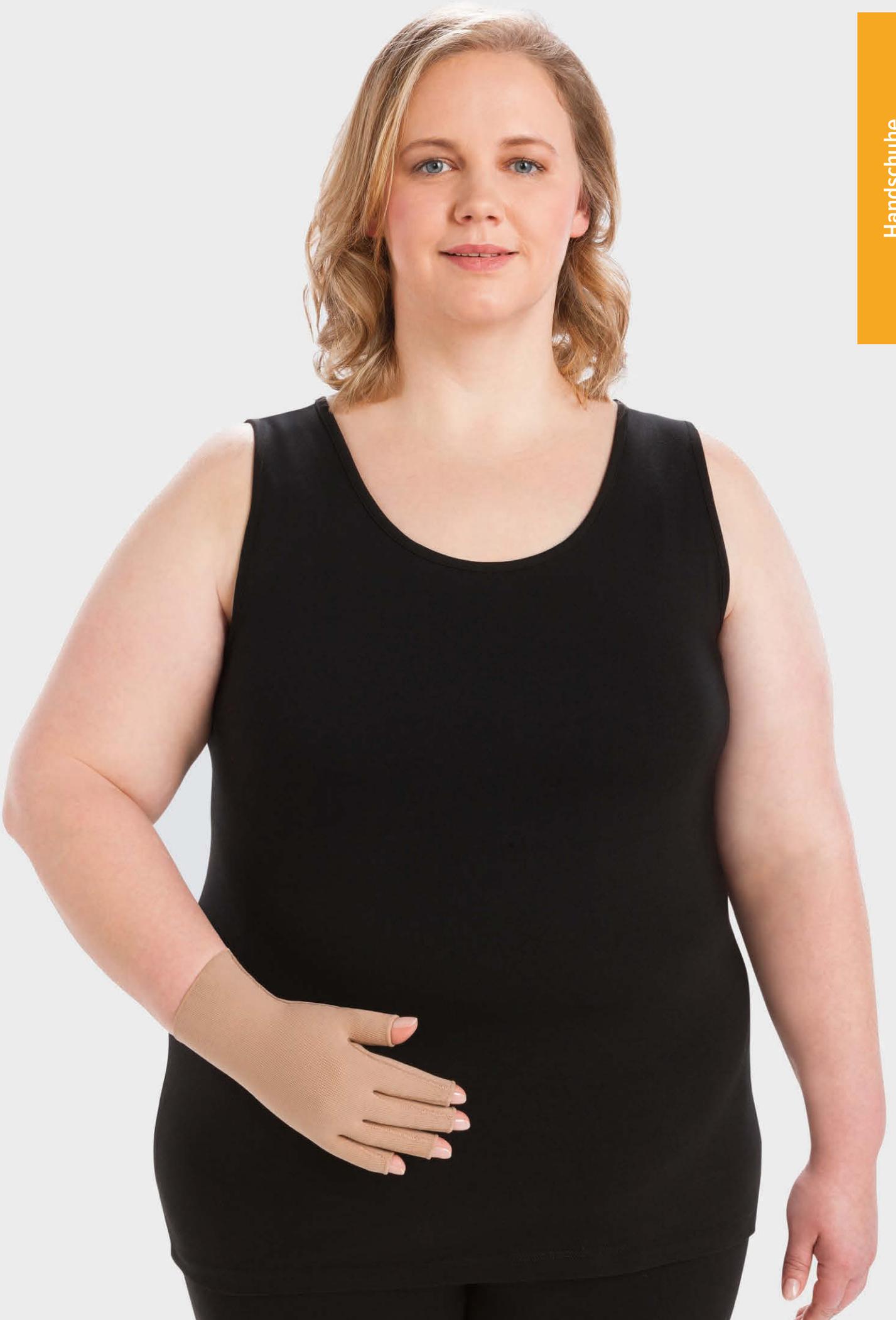

Handschuhe

Handschuhe

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver



· Auch Daumen geschlossen möglich

· Auch Fingerling geschlossen möglich



- Seitliche Überhöhung**
- Lateraler, schräger Abschluss
 - Optimierter Druckauslauf nach proximal

- Noppenhafrand - 3,5 cm**
- Hohe Stabilität und Atmungsaktivität durch Silikonknoppen
 - Möglich bei Unterarmstrumpf mit Handteil

- Balancehafrand - 3,5 cm**
- Besonders hohe Luftdurchlässigkeit
 - Minimale Scherkräfte
 - Möglich bei Unterarmstrumpf mit Handteil

- Unterarmstrumpf mit Handteil**
- Länge individuell möglich bis max. „cE“

Sonderausstattungen



Reißverschluss

- Individuelle Platzierung



Eingearbeitete Tasche für Pelotte

- Tasche für Standardpelotte
- Individuell nach Anzeichnung
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich



Silikonbeschichtung

- Verbesserte Greiffähigkeit
- Bei offenen und geschlossenen Fingern möglich



Futterstoff

- Zwischen Daumen und Zeigefinger
- Bei empfindlicher Haut
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich



Nähte nach außen gelegt

- Besonders flache Naht auf der Haut
- Geeignet bei empfindlicher Haut



Fingerling geschlossen mit Halterung

- Mit Klettverschluss
- Auch Fingerling offen möglich

Zusatzprodukte · Handschuhe

Lymphpads		Pelotten	
			
Lymphpad Line	Lymphpad Square	Druckpelotte lang	Druckpelotte kurz
<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Verbesserte Druckübertragung auf Handrücken, handgelenkübergreifend · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · Verbesserte Druckübertragung auf Handrücken · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich
SoftCompress	Reißverschluss	Pflegeprodukte	
			
Handkompresse	Reißverschlussverlängerung	Lymph Lotion	Spezialwaschmittel
<ul style="list-style-type: none"> · Verbesserte Druckübertragung auf Handrücken 	<ul style="list-style-type: none"> · Leichteres Öffnen und Schließen 	<ul style="list-style-type: none"> · Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödemen 	<ul style="list-style-type: none"> · Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung
Anziehhilfen	Accessoires		
			
Arion Dactyna	Spezialhandschuhe		
<ul style="list-style-type: none"> · Bei Kompressionshandschuhen mit offenen Fingerspitzen 	<ul style="list-style-type: none"> · Griffige Beschichtung · Erleichtert das Anziehen der Kompressionsbekleidung 		




Ärmel


Ärmel

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver
- Juzo Expert Cotton
- Juzo Expert Strong
- Juzo Expert Strong Silver

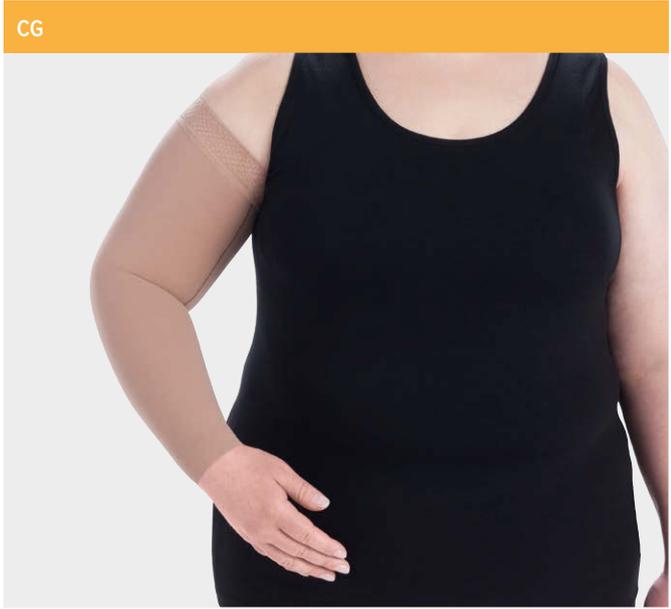

Abschluss / Befestigung

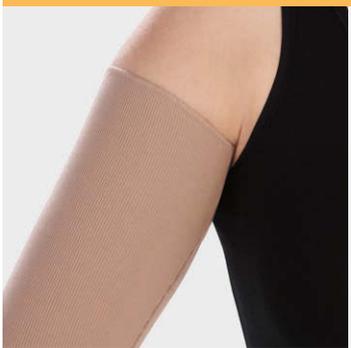

**Seitliche Überhöhung/
Seitliche Überhöhung max.**

- Lateraler, schräger Abschluss
- Optimierter Druckauslauf nach proximal



Gestrickabschluss

- Zusätzliche Befestigung erforderlich (z.B. Adhäsionslotion)



**Noppenhafrand · 5 cm
Noppenhafrand Motiv · 5 cm**

- Noppenhafrand auch Breite 3,5 cm
- Hohe Stabilität und Atmungsaktivität durch Silikonknoppen



**Balancehafrand · 5 cm
Balancehafrand Motiv · 5 cm**

- Balancehafrand auch Breite 3,5 cm
- Besonders hohe Luftdurchlässigkeit
- Minimale Scherkräfte



Elastisches Band · 3,5 cm

- Stabiles Band
- Silikonfrei



BH-Befestigung

- Befestigungsmöglichkeit am BH-Träger mit Klettverschluss



Schulter und Haltegurt

- Alternative zum Hafrand



Bolerverbindung

- Befestigungsmöglichkeit bei beidseitiger Armversorgung
- Mit Ärmeln und/oder Armsätzen
- Rückenteil ohne Kompression

Sonderausstattungen



Anatomisch abgewinkelter Ellenbogen

- 30°- oder 50°-Abwinkelung möglich
- Bei überwiegend abgewinkelter Ellenbogenposition



Naht an der Armaußenseite bei CG

- Bei empfindlicher Ellenbeuge
- Nur mit anatomisch abgewinkelter Form 30° möglich



Haftbandstücke

- Bi-elastisches Material
- Zusätzliche Haftung am Oberarm
- Mögliche Platzierung: seitlich außen quer




Innen eingenähter Haftrand

- Nur mit Überhöhung
- Mehr Stabilität und Haftung
- Auch 3/4 innen eingenäht möglich
- Mit oben angesetztem Haftrand kombinierbar



BH-Befestigung mit Haftuntertritt

- Zusätzlicher Halt im Schulterbereich

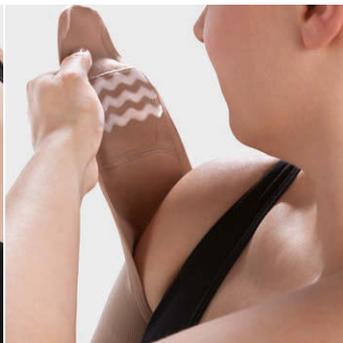

Boleroverbindung mit Haftuntertritt

- Zusätzlicher Halt im Schulterbereich



Futterstoff bei „cE“

- Bei empfindlicher Haut in der Ellenbeuge
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich



Eingearbeitete Tasche für Pelotte

- Individuell nach Anzeichnung
- Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich



Nähte nach außen gelegt


- Besonders flache Naht auf der Haut
- Geeignet für empfindliche Haut



Reißverschluss

- Individuelle Platzierung

Zusatzprodukte · Ärmel

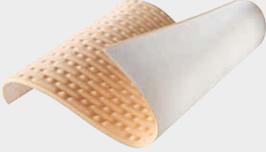Lymphpads		SoftCompress	Befestigung
			
Lymphpad Line	Lymphpad Square	Einlage Ellenbeuge	Adhäsionslotion
<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Optimierung der Druckverhältnisse in der Ellenbeuge 	<ul style="list-style-type: none"> · Spezial-Roll-on für einen sicheren Halt von Strümpfen und Ärmeln

Pflegeprodukte		Anziehilfen	
			
Lymph Lotion	Spezialwaschmittel	Slippie Arm	Arion EasySlide Arm
<ul style="list-style-type: none"> · Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödemen 	<ul style="list-style-type: none"> · Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung 	<ul style="list-style-type: none"> · Besonders gleitfähiges Material 	<ul style="list-style-type: none"> · Glattes doppellagiges Material

Accessoires


Spezialhandschuhe

- Griffige Beschichtung
- Erleichtert das Anziehen der Kompressionsbekleidung



Thoraxversorgungen

Erhältlich in
 • Juzo Expert
 • Juzo Expert Silver

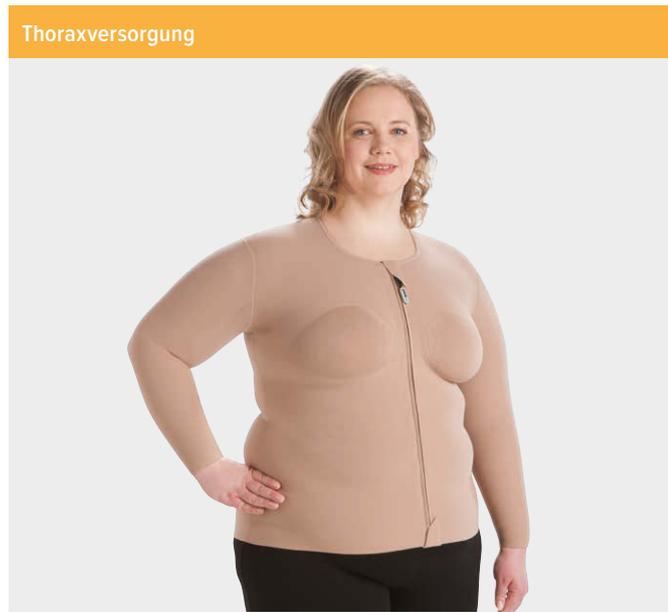

Thoraxversorgung

Ausführungsvarianten

Thoraxversorgung mit Ärmeln

Kompressionsbody mit Ärmeln

Verschlussmöglichkeiten



Reißverschluss

- Mit Haken-/Ösen-Untertritt zum leichteren Schließen
- Individuelle Platzierung möglich

Reißverschluss verstärkt

- Mit verstärktem Haken-/Ösen-Untertritt
- Für starke Beanspruchung
- Individuelle Platzierung möglich

Hakenverschluss

- Verstellmöglichkeit durch zweite Ösenreihe
- Individuelle Platzierung möglich

Hakenverschluss verstärkt

- Verstellmöglichkeit durch zweite Ösenreihe
- Für starke Beanspruchung
- Individuelle Platzierung möglich

Abschluss



Noppenhafterand · 5 cm

- Flacher, distaler Abschluss
- Mit Silikonknoppen

Taillengurt · 5 cm

- Flacher, elastischer distaler Abschluss

Bodybefestigung mit Hakenverschluss

- Vermeidet ein Hochrutschen

Bodybefestigung mit Klettverschluss

- Vermeidet ein Hochrutschen
- Alternative zum Hakenverschluss

Sonderausstattungen



Eingestrickte BH-Cups	Prothesentasche	Anatomisch abgewinkelter Ellenbogen	Futterstoff bei „cE“
------------------------------	------------------------	--	-----------------------------

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Nahtlose BH-Körbchen · Leicht komprimierend | <ul style="list-style-type: none"> · Eingenähte Prothesentasche mit drei Öffnungen | <ul style="list-style-type: none"> · 30°- oder 50°-Abwinkelung möglich · Bei überwiegend abgewinkelter Ellenbogenposition | <ul style="list-style-type: none"> · Bei empfindlicher Haut in der Ellenbeuge · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich |
|--|---|---|--|



Armansatz mit integr. Reißverschluss	Eingearbeitete Tasche für Pelotte	Stehkragen	Nähte nach außen gelegt
---	--	-------------------	--------------------------------

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Platzierung | <ul style="list-style-type: none"> · Individuell nach Anzeichnung · Bei Hautirritationen auch mit Silber möglich | <ul style="list-style-type: none"> · Bei Ödematisierung in der Halsregion, im Nackenbereich, oder im oberen Schulterbereich (ggf. in Kombination mit einer Kopfbandage zu empfehlen) | <ul style="list-style-type: none"> · Besonders flache Naht auf der Haut · Geeignet für empfindliche Haut |
|--|--|---|--|



Unelastische Rückenzone

- Bei Erwachsenen
- Unterstützt aufrechte Körperhaltung
- Wirkt Schonhaltung entgegen

Zusatzprodukte · Thoraxversorgungen

Lymphpads		ScarPad	
			
Lymphpad Line	Lymphpad Square	ScarPad Extra	ScarPad Extra Strong

- Anregung der Mikrozirkulation
- Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies
- Größe 20 x 29,5 cm

- Anregung der Mikrozirkulation
- Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies
- Größe 20 x 29,5 cm

- Silikonauflage für Narben

- Silikonauflage für Narben

SoftCompress		Reißverschluss	Pflegeprodukte
			
Brusttrichter	Einlage Ellenbeuge	Reißverschlussverlängerung	Spezialwaschmittel

- Für Frauen
- Gezielte Druckübertragung im Brust- und Thoraxbereich

- Optimierung der Druckverhältnisse in der Ellenbeuge

- Leichteres Öffnen und Schließen

- Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung

Anziehhilfen		Accessoires
		
Slippie Arm	Arion EasySlide Arm	Spezialhandschuhe

- Besonders gleitfähiges Material

- Glattes, doppellagiges Material


- Griffige Beschichtung
- Erleichtert das Anziehen der Kompressionsbekleidung



Kopfversorgungen

Erhältlich in

- Juzo Expert
- Juzo Expert Silver

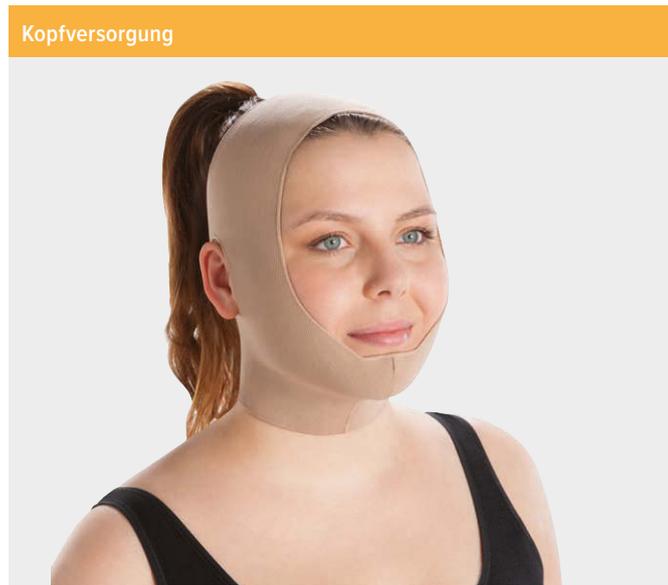

Sonderausstattungen		
		
Aussparungen		Eingestrickte Nase
· Augen, Mund, Ohren und Nase möglich		· Kompression im Bereich der Nase

Zusatzprodukte · Kopfversorgungen

Lymphpads		ScarPad
		
Lymphpad Line	Lymphpad Square	ScarPad Light
<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Silikonauflage für Narben






Lebensfreude in Bewegung



Stumpfversorgungen (Arm und Bein)


Stumpfversorgungen	Ausführungsvarianten
	<ul style="list-style-type: none"> · Unterschenkelstumpf · Unterschenkelstumpf nach Pirogoff-Amputation · Oberschenkelstumpf · Armstumpf

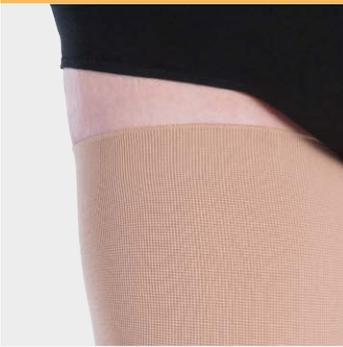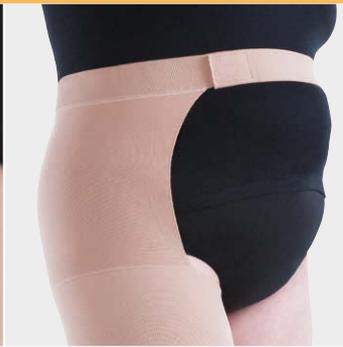Abschluss / Befestigung Bein		
		
<p>Gestrickabschluss</p>	<p>Hüftbefestigung einzeln</p>	<p>Angenähtes Leibteil</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Zusätzliche Befestigung erforderlich (z.B. Adhäsionslotion) 	<ul style="list-style-type: none"> · Zusätzlicher Haftrand zur besseren Fixierung möglich · Links oder rechts zu tragen 	<ul style="list-style-type: none"> · Alternative Befestigungsmöglichkeit mit Kompression im Bauchbereich

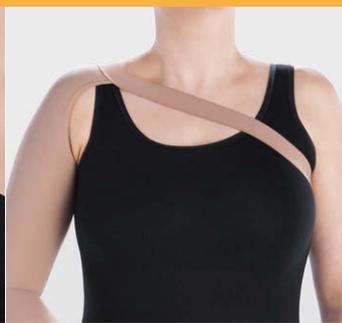Abschluss / Befestigung Arm		
		
<p>Gestrickabschluss</p>	<p>BH-Befestigung</p>	<p>Schulter und Haltegurt</p>
<ul style="list-style-type: none"> · Zusätzliche Befestigung erforderlich (z.B. Adhäsionslotion) 	<ul style="list-style-type: none"> · Befestigungsmöglichkeit am BH-Träger mit Klettverschluss 	<ul style="list-style-type: none"> · Alternative zum Haftrand

Hafränder Bein / Arm		Sonderausstattung
		
Noppenhafränder · 3,5 cm / 5 cm	Balancehafränder · 3,5 cm / 5 cm	Prothesenstiftöffnung
<ul style="list-style-type: none"> · 3,5 cm bei Unterschenkel- und Armstumpfstrümpfen möglich · 5 cm bei Unter- und Oberschenkelstumpfstrümpfen möglich · Hohe Stabilität und Atmungsaktivität durch Silikonknoppen 	<ul style="list-style-type: none"> · 3,5 cm bei Unterschenkel- und Armstumpfstrümpfen möglich · 5 cm bei Unter- und Oberschenkelstumpfstrümpfen möglich · Besonders hohe Luftdurchlässigkeit · Minimale Scherkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> · Öffnung 3 cm zum Stumpfende

Zusatzprodukte · Stumpfversorgungen (Arm und Bein)

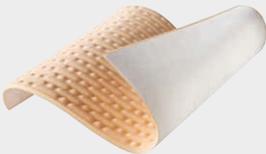Lymphpads		ScarPad	
			
Lymphpad Line	Lymphpad Square	ScarPad Extra	ScarPad Extra Strong
<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Anregung der Mikrozirkulation · Synthetisches Latex, Rückseite aus Polyamid-Vlies · Größe 20 x 29,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Silikonauflage für Narben 	<ul style="list-style-type: none"> · Silikonauflage für Narben

Pflegeprodukte	Accessoires
	
Spezialwaschmittel	Spezialhandschuhe
<ul style="list-style-type: none"> · Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung 	<ul style="list-style-type: none"> · Griffige Beschichtung · Erleichtert das Anziehen der Kompressionsbekleidung

Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

Mehrteilige Versorgungen

Mehrteilige Versorgungen sind erforderlich, um das An- und Ausziehen für Patientinnen mit Komorbiditäten wie z. B. Rheuma, Rückenbeschwerden oder Inkontinenz zu ermöglichen.

Gängige Kombinationsmöglichkeiten

- AD + Capri (CT) oder Leggings (B'T)
- AG + Radlerhose (FT) oder Bermuda (ET)
- Ärmel (CG) + Handschuh

Vorteile

- + Leichtes An- und Ausziehen
- + Passgenaue Versorgung bei „Kalibersprüngen“

Doppelversorgungen

Ist eine lokale Druckerhöhung erforderlich, besteht die Möglichkeit einer Doppelbestrumpfung. So empfiehlt sich beispielsweise bei einem distal ausgeprägten Lymphödem der unteren Extremitäten die Kombination aus Kompressionswadenstrümpfen und -leggings. Umgekehrt kann eine Doppelbestrumpfung mit Schenkelstrümpfen und Bermuda erforderlich sein, wenn etwa bei einem Lipödem oder sekundärem Lymphödem eine eher proximale Betonung besteht. Man beachte, dass sich bei einer solchen Doppelversorgung die Druckwerte addieren, nicht aber die Kompressionsklasse verdoppelt. So ergibt die Kombination zweier Versorgungen mit 23 mmHg (KKL 2) zusammen 46 mmHg, was der KKL 3 entspricht.

Gängige Kombinationsmöglichkeiten

- AD + Leggings (BT, B'T)
- AG + Bermuda (ET)
- AG + Capri (CT) oder Leggings (BT, B'T)


Vorteile

- + Gezielte Druckverstärkung in den Überlappungsbereichen
- + Kombination verschiedener Flachstrickprodukte möglich
- + Kombination verschiedener Kompressionsklassen möglich

Beispiele Kombinationsmöglichkeiten



AD-Strumpf + Leggings (B'T)

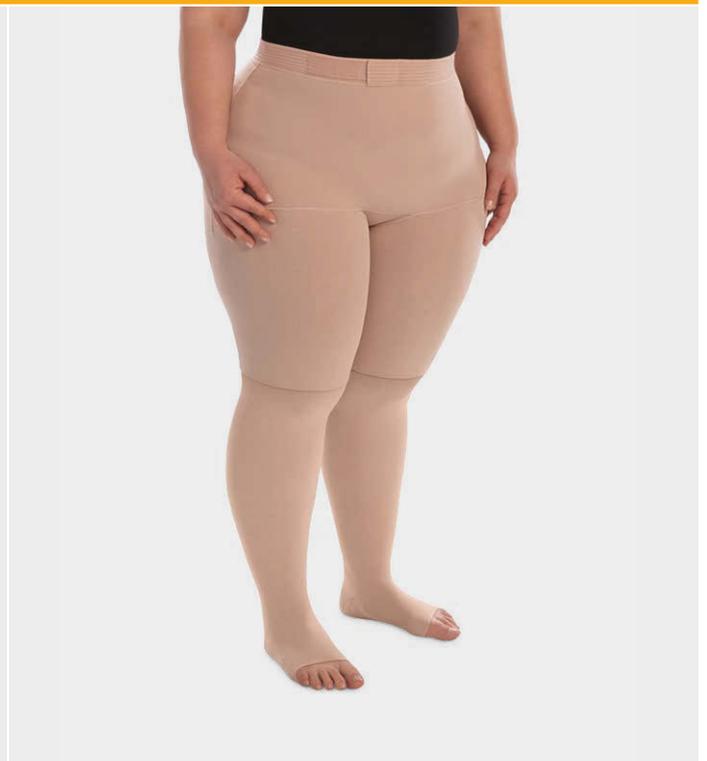

AG-Strumpf + Bermuda (ET)

Praxistipps für den Versorger

Regelmäßig die Passform prüfen

Kompressionsbekleidung muss perfekt sitzen. Doch die Passgenauigkeit der Kompressionsbekleidung kann im Laufe der Zeit nachlassen, wenn sich beim Patienten das Gewicht bzw. die Umfänge (z. B. bei Ödemreduzierung) verändern.

Der Versorger sollte deshalb den korrekten Sitz und die Passform regelmäßig prüfen und ggf. Änderungen veranlassen oder eine Neuanfertigung empfehlen.

Die Pflege der Produkte erklären

Die Kompressionsbekleidung sollte täglich bei 40 °C gewaschen werden, damit sich die Materialien regenerieren können. Zum Waschen empfiehlt es sich, das Juzo Spezialwaschmittel zu verwenden und auf Weichspüler zu verzichten.

Zur täglichen Hautpflege anleiten

Die trockene Haut bleibt durch tägliches Eincremen und Massieren geschmeidig. Die Haut sollte stets sauber und elastisch gehalten werden, um möglichen Entzündungen vorzubeugen.

Auf die Tragezeit hinweisen

Die Kompressionsbekleidung ist nach Verordnung des Arztes zu tragen. Nur so kann der optimale Therapieerfolg erzielt werden. Ein konsequentes Tragen ist jeden Tag bzw. nach ärztlicher Verordnung notwendig.

Um Hygiene und Materialregeneration zu gewährleisten, sollte der Versorger dem Patienten einen täglichen Wechsel der Kompressionsbekleidung empfehlen. Idealerweise erhält der Patient deshalb eine Wechselversorgung.

Vor zu viel Sonneneinstrahlung warnen

Direkte Sonneneinstrahlung ist möglichst zu meiden, da sie Hautveränderungen und Pigmentstörungen fördert.

Fallbeispiel

Kompressionsversorgung mit Juzo Expert und Juzo Expert Strong

Ursula K. (geb. 1954) erkrankte mit 39 Jahren an Gebärmutterhalskrebs. Nach Wertheim-Operation, der Entfernung von mehr als 30 Lymphknoten und einer Lymphzyste im Unterbauch bekam Ursula K. direkt ein Lymphödem in beiden Beinen. Seit 1993 befindet sie sich nun in Behandlung wegen des Lymphödems mit MLD und Kompression. Zunächst wurde sie mit Rundstrick versorgt – allerdings mit nicht optimalem Ergebnis. Durch Zufall kam Ursula K. nach ca. 3 Jahren zum Juzo Expert. Seitdem wird sie mit Juzo Expert und Juzo Expert Strong versorgt.



Sekundäres Lymphödem in beiden Beinen nach diversen Operationen in Folge von Gebärmutterhalskrebs



Versorgungsbeispiel Kompressionsstrumpfhose (AT), Juzo Expert

Versorgungsbeispiel mehrteilige Versorgung: Kompressionsstrümpfe (AG) linkes Bein in Juzo Expert Strong (KKL 3), rechtes Bein in Juzo Expert (KKL 2), darüber Kompressionscaprihose in Juzo Expert (KKL 2)

Juzo Kundenservice

DE · Tel.: +49 (0)8251 901 0 · Fax: 0800 08 35 393 · E-Mail: bestellung@juzo.de

AT + CH · Tel.: +49 (0)8251 901 300 · Fax: +49 (0)8251 901 321 · E-Mail: order@juzo.at · E-Mail: order@juzo.ch

Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Deutschland · info@juzo.de · www.juzo.com

DEU · 14290001/22/24 · 8408 LY · 09/2020
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

